

**Produktanleitung**

Stand: Januar 2015

**Deckenschienenset**

Art.-Nr.: 020-0210



**Beschreibung:**

Das Befestigungssystem ULLEWAEH-System T ist ein multifunktionales und hochgradig belastbares Aufhängesystem. Sie haben die Möglichkeit in Ihrem Therapie- oder SI-Raum sowie im Funktions- oder Motorikbereich eine optimale therapeutische Variationsbreite zu erzielen. Es ergeben sich zentimetergenaue vertikale Einstellmöglichkeiten, welche Ihnen neue Therapievarianten sowie eine individuelle Dosierung der Therapie ermöglichen. Als Deckenschienenset werden 2 Schienen im Achsabstand von 80cm zumeist möglichst mittig an der Raumdecke angeordnet, so dass Schaukeln in 2-Punkt und 4-Punkt Aufhängesituationen befestigt werden können. Durch die Verwendung mehrerer Schlitten können auch mehrere Geräte hintereinander aufgehängt werden, und so zum Beispiel Wackelpfade und andere Geräte-Kombination aufzubauen.

Deckenschienensysteme werden entsprechend der räumlichen Möglichkeiten individuell geplant und gestaltet.

**Maße / Gewicht:**

Länge: 3,00m

Gewicht: 2,55kg / Schiene

**Lieferumfang:**

- 1 Deckenschienen-Set bestehend aus:
  - 2 St. Alu-T-Schiene Länge 3m
  - 4 St. Standard Deckenschlitten
  - 4 St. Sicherheitsstopper Decke



**Bedienung:**

**Positionierung der Deckenschlitten**

Arretieren Sie die Spezialschlitten auf den beiden horizontalen Schienen an der Decke in der gewünschten Position. Achten Sie unbedingt auf das „Klick“-Geräusch, welches die richtige Arretierung des Schlittens signalisiert.

Setzen Sie nun die Stopper für den Deckenbereich jeweils an beide Enden der Schiene und verschrauben Sie diese mit einem Inbusschlüssel die Schraube handfest an. Zusätzlich empfehlen wir jeweils ein Endstück an die Enden der Deckenschienen zu setzen, um die scharfen Kanten abzusichern.

Um die Deckenschlitten neu zu positionieren, empfehlen wir die Verwendung des Fernauslösestabs, um auf den Einsatz einer Leiter verzichten zu können.

**Das Befestigungssystem T ist für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

**Material:**

Hochwertiges Aluminium, seewasserfest

**Empfohlenes Zubehör:**

ULLEWAEH®-System T,  
ULLEWAEH®-Systemzubehör  
Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

**Sicherheitshinweis:**

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Wir bitten, die Montage unseres Schienensystems nur durch die Fa. ULLEWAEH selbst oder aber einen anderen durch Fa. Ullewaeh autorisierten FACHBETRIEB ausführen zu lassen. Für einen durch unsachgemäße Montage entstandenen Schaden übernimmt die Fa. ULLEWAEH keine Gewährleistung.



## Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr  
**Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung von ULLEWAEH-Produkten

**ULLEWAEH!**

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel