

### Vorgehensweise bei der Aufhängung:

Arretieren Sie die Wandschlitten auf den vier vertikalen Schienen in gleich hoher Position (abhängig vom Schwierigkeitsgrad). Grundsätzlich gilt: Je steiler der Anstieg, desto größer der Schwierigkeitsgrad des Kletternetzes. Somit müssen die Wandschlitten individuell auf die Motorik-/ bzw. Therapiesituation angepasst werden. Achten Sie auf die sichere Arretierung des Schlittens.



#### Aufhängeseil mit Stellacht:

Ziehen Sie das Aufhängeseil durch eine Eckmasche des Kletternetzes und stellen Sie es mit Hilfe der Stellacht auf die angemessene Länge ein. Verbinden Sie nun den Ring des Verlängerungsseiles mit einem Sicherheitskarabiner. Verbinden Sie den Sicherheitskarabiner mit dem Wand- oder Deckenschlitten. Führen Sie diesen Vorgang für alle vier Aufhängungspunkte durch.

#### Alternative Aufhängesysteme:

- Komfort-Höheneinsteller
- Direkte Anbindung am Wand- oder Deckenschlitten mit Sicherheitskarabiner



### Fallschutz:

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turnmatten und einen ausreichenden Fallschutzbereich um das Kletternetz herum.

### Aufhängevarianten:

Horizontale Anordnung:



Klettervorhang:



Bucht:



Doppeldecker:



Zugspitze:

An 4 Wandpunkten und 1 Deckenpunkt



Kombination mit Schwebetuch:



Schräge Ebene:



**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstip:

Das Kletternetz ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.



**Achtung**

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.

## Spezifikation

Maße: 2,50 m x 3,00 m  
Maschenweite: 25 cm  
Gewicht: ca. 10kg



Material: weich geschlagenes PP-Hempex Tauwerk 16 mm  
Farben: natur, blau, grün oder rot

### Spezifikation Seil:

Werkstoff: Polypropylen-Multifil Farbe Natur  
Seilbruchkraft: 16mm 2180 daN im Spleiß  
Pressung: Alu-Pressklemme S 16 Sdlg 25mm  
Zugbelastung 1885 daN  
Seilverbinder: Seilknoten verspleißt (ohne Kugelknoten)

### Pflege:

Grobe Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch entfernt werden. Zum Trocknen hängen Sie das Kletternetz an einem gut gelüfteten Ort auf. Waschen Sie das Kletternetz nicht in der Waschmaschine! Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da hierbei Schmutz, Staubkörnchen oder andere feine Gegenstände noch tiefer in die Seile eindringen und die Fasern beschädigen können.

### Lieferumfang:

Ullewaeh-Kletternetz aus inklusive:  
4 Seilverlängerungen à 2,00 m, ausgestattet mit Ring und Stellacht  
4 Sicherheitskarabiner

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361  
Fax: 0 451 / 5040371  
e-Mail: info@ullewaeh.de

**Ullewaeh GmbH**  
Am Flugplatz 4 / Haus 6  
23562 Lübeck  
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

**ULLEWAEH!**  
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

**Kletternetz**

Datum: 08/2017

Art-Nr: 050-5010



### Beschreibung

Das ULLEWAEH-Kletternetz ist das multifunktionale Erweiterungs-Therapiemodul zur Verbesserung der Koordination und Tonusregulation. Auch eine hohe Druckstimulation im Fußreflexzonenbereich findet statt. Es lässt sich horizontal, vertikal, schräg oder als Dschungelbrücke über die ULLEWAEH-Schienensystematik immer wieder neu positionieren.