

Aufbauanleitung:

Richten Sie zwei Deckenschlitten so an der Deckenschiene aus, dass die Schlitten einen Abstand von Rollstuhlbreite plus etwa 10cm zu beiden Seiten hin haben.

Jetzt werden die beiden Flaschenzüge mit den vormontierten Sicherheitskarabinern in die Deckenschlitten (oder entsprechend andere vorhandene Aufhängeösen) eingehängt. Achten Sie darauf, dass der Flaschenzug richtig herum hängt, das heißt, dass die Seilklemme oben ist.



Anschließend wird je ein Sicherheitskarabiner in den unteren Teil des Flaschenzugs eingehängt. Diese dienen der Aufnahme von **jeweils zwei** verstellbaren Schlingen. Die einzuhängenden Ösen sind fest vernäht und werden in den Karabiner eingehängt.



In die unteren, losen Ösen der verstellbaren Schlingen kommen jetzt die letzten vier Sicherheitskarabiner. Diese werden im letzten Schritt dafür genutzt, die um den Rollstuhl geschlaufenen Schlingen aufzunehmen.



Verschlaufen der Rundschlingen an den Kraftknotenpunkten des Rollstuhls:




Führen Sie die Rundschlinge um die Aufnahme



und ein Ende davon zweimal durch die gegenüberliegende Schlaufe.



Sortieren Sie die Schlaufe so, dass die Bänder keine Knickstellen haben oder übereinander liegenden.

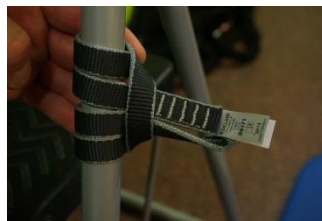

So sehen die fertigen Schlaufen aus, welche jetzt an die oben beschriebenen Karabiner der verstellbaren Schlinge eingehängt werden können.

Verwendung des Flaschenzuges:

Durch die Verstellung des Flaschenzuges wird die generelle Höhe eingestellt. Die Feinjustierung (z.B. das leicht nach hinten Neigen des Rollstuhls) wird durch das Verstellen an den „verstellbaren Schlingen“ ausgeführt.



Gelöst



Arretiert

Das Hochziehen des Rollstuhls, wie auch das Herunterlassen sollte immer von 2 Personen durchgeführt werden. Achten Sie darauf, die Ihre Hände immer ausreichend weit weg von der Seilklemme sind – Klemmfahr.

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Sicherheitstip:

Nur geschultes Personal sollte die Rollstuhlschaukel aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung, und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.



Spezifikation

Gewicht: ca. 4,0kg



Lieferumfang

- 8x Sicherheitskarabiner
- 2x Flaschenzug (6-fach umgelenkt)
- 4x verstellbare Schlinge 110cm
- 4x Rundschlinge 30cm
- 4x Schutzhülle

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361
Fax: 0451 / 5040371
e-Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH
Am Flugplatz 4 / Haus 6
23562 Lübeck
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

ULLEWAEH!
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

Mobile Rollstuhlschaukel

Datum: 02/2016

Art-Nr: 050-6110



Beschreibung

Basierend auf System-Zubehör-Komponenten ist das Rollstuhlschaukel-Aufhängesystem entwickelt worden. Ein qualitativ hochwertiges und einfach zu bedienendes Verbindungsprinzip wurde gestaltet, welches im Innenbereich aber auch im Freien verwendet werden kann. Im eigenen Rollstuhl sitzen bleibend, wird es an den vier Kraftknotenpunkten des Rollstuhls einfach und komfortabel angebracht.