

Anordnung Aufhänge-Set:

Bringen Sie für eine 2-Punktaufhängung zwei Deckenschlitten im Abstand von ca. 125cm an die gewünschten Positionen. Wenn Sie eine 4-Punkt Aufbauvariante wählen, so sollten die zwei Schlitten auf der zweiten Deckenschiene möglichst parallel dazu angeordnet sein. Achten Sie auf das „Klick“-Geräusch der Arretierungsbolzen.

Um die Motorikrolle an Deckenschienen oder anderen Abhängepunkte einzuhängen, achten Sie immer auf folgende grundsätzliche Anordnung des Aufhängesystems:



Idealerweise arbeiten Sie von „oben nach unten“:

Befestigen Sie daher zuerst das Aufhängeset mit den Elastiksystemen oben an den Deckenschlitten. Anschließend werden die Komfort-Höheneinsteller eingehangen. Anstelle von Komfort-Höheneinstellern können auch Aufhängeseile oder feste Rundschnüre verwendet werden. Im letzten Schritt heben Sie die Motorik-Rolle einseitig an und schließen sie nun die Aufhängelasche der Motorik-Rolle mit einem Karabiner an das den Komfort-Höheneinsteller an.

Stellen Sie die Länge der Aufhängung so ein, dass die Motorik-Rolle unter Belastung circa 15cm über dem Boden schwebt.

Hinweis:

Achten Sie immer auf die richtige Ausrichtung der Rolle, die mit der Bezeichnung „OBEN“ gekennzeichnet ist.

Aufhängung mit Komfort-Höheneinsteller:



Obere Anbindung an das Federsystem



Untere Anbindung an die Motorik-Rolle

Aufhängeseil mit Stellacht:



Obere Anbindung an das Federsystem



Untere Anbindung an die Motorik-Rolle

Waschtrommel:



Verschließen Sie die Motorik-Rolle mit den im Lieferumfang enthaltenen Netzverschlüssen. Achten Sie dabei darauf, dass das Netzteil nicht gefaltet oder verdreht ist, dann kann der Reißverschluss leicht zugezogen werden. Die Aufhängelaschen werden entlang der Klett-Flauschlaschen um die Rolle herum geklettet.

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

Die Kinder sind während des Aufenthaltes im oder am Gerät zu beaufsichtigen.

Sicherheitstip:


Nur fachkundig geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Durch die verschiedenen Möglichkeiten der Seilaufhängungen ist auf die Vermeidung von kritischen Schlaufenbildungen zu achten! Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung, und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.



Achtung


Spezifikation

Bezug: Planenstoff
Gewicht: ca. 20kg
Hauptmaße:

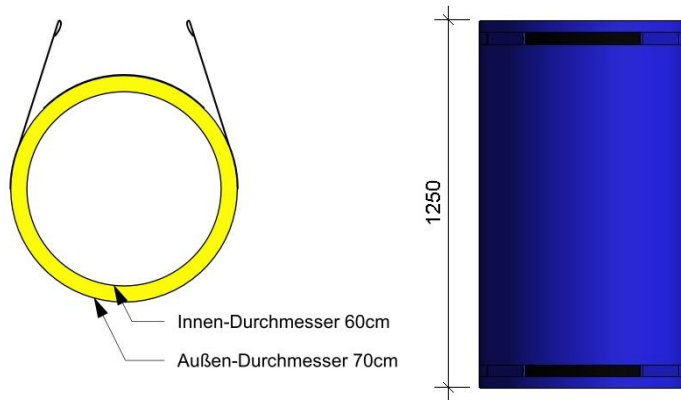

Ausführung:

Standardmäßig mit 4
Aufhängelaschen, welche mit
Klett-Flausch an der Rolle
befestigt werden können.

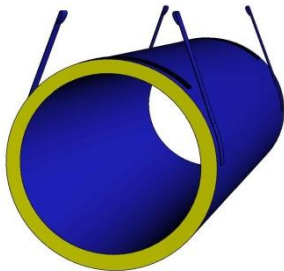

Lieferumfang:

ULLEWAEH-Motorik-Rolle inklusive
2 Stück Netzverschlüsse mit Reißverschluß
4 integrierte Aufhängeschlaufen

Motorik-Rolle Aufhängeset (Art.Nr. 050-2115)*

bestehend aus:

- 4 Stück Elastiksysteme
- 4 Stück Komfort-Höheneinsteller
- 12 Stück Sicherheitskarabiner

* Das Motorik-Rolle Aufhängeset muss separat bestellt werden.

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten
Tuch einfach vom Bezug abwischen.

Maximale Belastung:

Die Motorik-Rolle ist für eine maximale Belastung von 150kg
ausgelegt.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361
Fax: 0451 / 5040371
e-Mail: info@ullewaeh.de

Ullewaeh GmbH
Am Flugplatz 4 / Haus 6
23562 Lübeck
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

ULLEWAEH!
DER BEWEGUNG RAUM GEBEN.

Produktanleitung:

Motorik-Rolle

Datum: 06/2017

Art-Nr: 050-2110



Beschreibung

Die Ullewaeh-Motorik-Rolle ist Therapie- und Spielgerät zugleich. Als Therapiegerät kann sie in 2- und 4-Punktaufhängung an der Decke befestigt werden und dient maßgeblich der Balanceerfahrung. In Kombination mit den Ullewaeh-Elastiksystemen sammeln Kinder kinästhetische Bewegungserfahrungen in alle Raumrichtungen.

Am Boden kann die Motorik-Rolle zum Balancieren, Durchkriechen und Entspannen genutzt werden. Mit zusätzlichem Netzbezug wird aus ihr eine taktile Waschtrommel.