

## Anwendungsbeispiele

2-Punkt Aufhängung



2-Punkt  
Mit Elastikbänder-Set  
Für 3D-Schaukel-  
Effekt



1-Punkt  
Mit Drehwirbel



Hängematte



2-Punkt Aufhängung  
Mit Komfort-  
Aufhängeset  
Füllung: Multimatte und  
Rolle




2-Punkt Aufhängung  
Mit Komfort-  
Aufhängeset  
Füllung: Multimatte und  
Rolle



Mattenschaukel



Mattenschaukel XXL

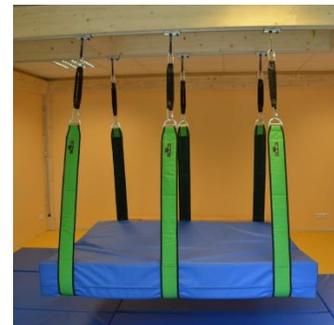

Balancierpfad  
Mit Halteseil



Max. Belastung 150kg

Es ist darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden Bewegungen des Multigurtes keine Kinder im Pendelbereich aufhalten.

**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstip:

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um sämtliche Möglichkeiten und die Variabilität der Systeme auszunutzen.



**Achtung**

## Spezifikation

Material: hochfestes Codura

Gewicht: ca. 900g

Hauptmaße: Breite ca. 120mm

Länge: 1m, 2m, 3m, 4m, und 6m

Farben: blau, grün und mango

(nicht alle Längen sind in allen Farben verfügbar)

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn., welches besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

## Pflegehinweise

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

## Lieferumfang

1 Ullewaeh Schaukelgurt aus Cordura mit Neopren Sitzfläche und Edelstahl-Aufhängepunkten.

## Empfohlenes Zubehör

- 050-3140 Multigurt Aufhangeset Komfort
- 050-3141 Multigurt Aufhangeset Elastik
- 040-5010 Drehwirbel

Produktanleitung:

**Multigurt**

Datum: 10/2016

Art-Nr: 050-31



## Beschreibung

Schaukeln war gestern – heute wird Multi-Gegurtet! Die Ullewaeh Multigurte setzen der Kreativität beim Schaukeln keine Grenzen. An 1-Punkt oder 2-Punkten aufgehängt, eng zusammen oder weit auseinander aufgespannt, in Kombination mit einem Drehwirbel in die Rotation gebracht oder mit Gummitubes eine federnde Dynamik erzeugen – der Name ist Programm!

Der Multigurt ist komplett gepolstert und zusätzlich mit einer verschiebbaren Neopren-Sitzfläche ausgestattet. Innen befindet sich ein schwarzes Antirutschgewebe. An den Enden sind fest vernähte Edelstahl-Aufhängepunkte zur sicheren Befestigung der Gurte mittels Sicherheitskarabiner vorgesehen.

Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361

Fax: 0451 / 5040371

e-Mail: info@ullewaeh.de

**Ullewaeh GmbH**

Am Flugplatz 4 / Haus 6

23560 Lübeck

Germany