


### Vorgehensweise bei der Aufhängung:

Arretieren Sie die Wandschlitten auf den vier vertikalen Schienen in gleich hoher Position. Grundsätzlich gilt: Je höher die Gewichtsbelastung, desto größer der Durchhang des Schwebetuches. Somit müssen die Wandschlitten individuell auf die Motorik-/ bzw. Therapiesituation angepasst werden. Achten Sie auf die sichere Arretierung des Schlittens.

Breiten Sie das Tuch so zentral im Raum aus, dass eine Verbindung zu den vier Wandschlitten möglich ist. Wählen Sie die angemessene Schlaufe an der Schlaufenbandverlängerung aus. Hängen Sie dann das Federsystem in die ausgewählte Schlaufe mit dem Sicherheitskarabiner ein. Verbinden Sie nun den zweiten Sicherheitskarabiner des Federsystems mit dem Wandschlitten. Führen Sie diesen Vorgang für alle vier Aufhängungspunkte durch.




*Hinweis: Erfahrungsgemäß lässt sich der 4te Punkt am schwersten einhängen. Hier empfiehlt es sich, das Ullewaeh- Flaschenzugsystem zur Unterstützung dazu zu nehmen.*

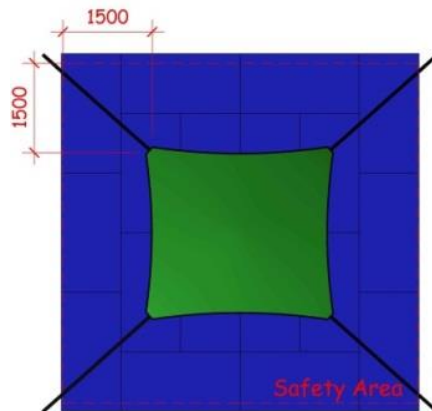

### Fallschutz:

Achten Sie auf adäquaten Fallschutz durch entsprechende Turnmatten und einen ausreichenden Fallschutzbereich um das Schwebetuch herum.

Horizontale Anordnung:

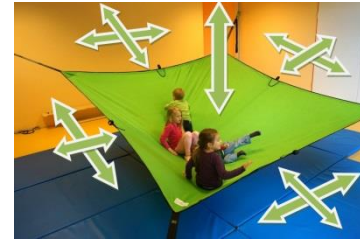

Horizontale Anordnung und Wellenstimulation von außen:



Geneigte Ebene:



Gletscherspalte mit Turnmatte:



Geöffnete Gletscherspalte mit Stimulation von außen:



Kombination mit Kletternetz:



**Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.**

Sicherheitstip:

Das Ullewaeh-Schwebetuch ist für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt. Mit Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen. Schwebetücher müssen grundsätzlich mit den mitgelieferten Federsystemen oder mit Elastikbändern aufgehängt werden, um eine übermäßige Beanspruchung der Gurtbandnähte zu verhindern.



**Achtung**


Es ist sicherzustellen, dass sich während der Benutzung des Schwebetuches keine Person darunter aufhält! Auch im belasteten Zustand sollte immer ein **Abstand von 45-50cm zum Boden** gewährleistet sein.

Nur geschultes Personal sollte Parcours oder Schaukelstationen aufbauen. Regelmäßige Übungen und Schulungen sind grundlegend für eine sichere Handhabung und um die Möglichkeiten und Variabilität des Systems komplett auszunutzen.

## Spezifikation

285cm x 285cm Tuchfläche

Gewicht: ca. 10kg

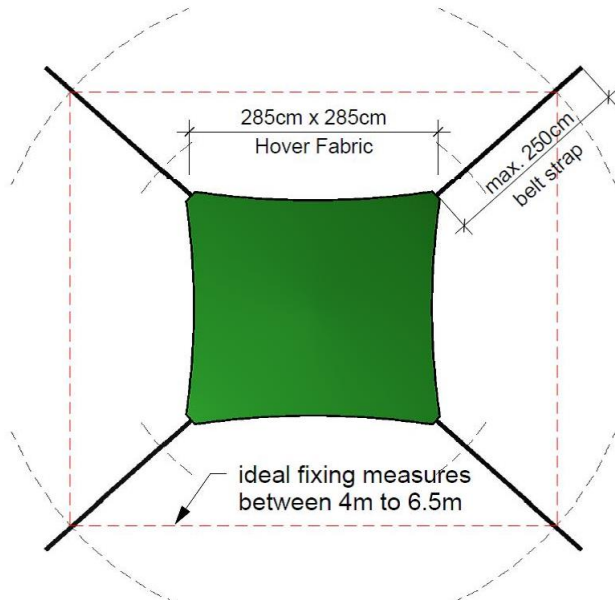

Tuchmaterial: Cordura  
Gurtbänder: Polyacrylic

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn verträgt extrem starken Abrieb. Es ist ein spezielles Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Risse, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

### Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

### Lieferumfang:

1x Schwebetuch mit 4 fest vernähten Gurtbändern  
4x Federsysteme  
1x Transporttasche

### Kontakt:

Tel: 0451 / 5040361  
Fax: 0 451 / 5040371  
e-Mail: [info@ullewaeh.de](mailto:info@ullewaeh.de)

**Ullewaeh GmbH**  
Am Flugplatz 4 / Haus 6  
23562 Lübeck  
Germany

HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 51

Produktanleitung:

## Schwebetuch

Datum: 06/2017

Art-Nr: 050-1100



### Beschreibung

Das Ullewaeh-Schwebetuch ist das multifunktionale Basis-Therapiemodul zur Wahrnehmungsverbesserung. Es fördert und verbessert die gesamte vestibuläre Wahrnehmung. An zwei Punkten im Raum aufgespannt, entsteht ein Schlauch bzw. die „Gletscherspalte“ zur Verbesserung der proprioceptiven Wahrnehmung.