


Produktanleitung
Stand: November 2013

Höheneinsteller Duck

Art.-Nr.: 8400 Duck.

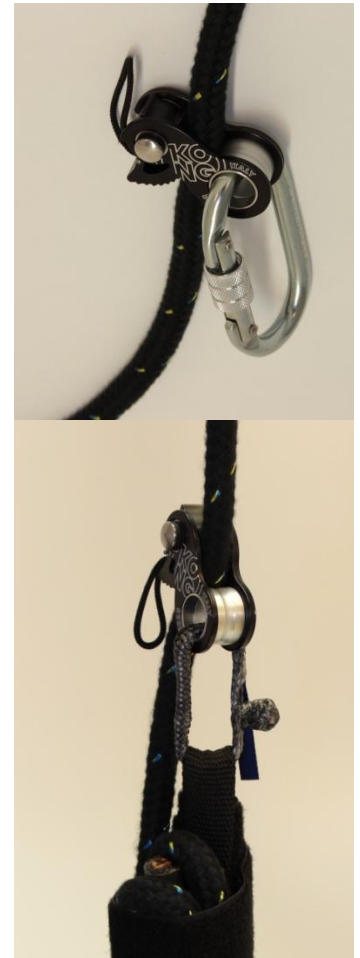

Beschreibung:


Der „DUCK“ ist eine Klemme, die auf Texturseilen mit einem Durchmesser von 8 und 13mm eingesetzt wird. Unter Belastung klemmt der Duck in eine Richtung, gleitet aber weiterhin ungehindert in die entgegengesetzte Richtung. Im Ullewaeh-Programm wird der Duck als Höheneinsteller verwendet, um schnell auf unterschiedliche Körpergrößen, unterschiedliches Gewicht oder Anforderungsgrade reagieren zu können. In Verbindung mit einem Sicherheitskarabiner oder Soft Schäkel, können zahlreicher temporäre Therapiegeräte direkt an den Duck angeschlossen werden.

Achtung: Diese Vorrichtung funktioniert perfekt auf trockenen und sauberen Seilen. Auf verschmutzten, fettigen oder verdreckten Seilen kann der Duck abrutschen. Der Duck ist außerdem nicht für die Verwendung auf Metallseilen geeignet.

Lieferumfang:

- - 1 Duck, belastbar bis zu 400kg

Bedienung:

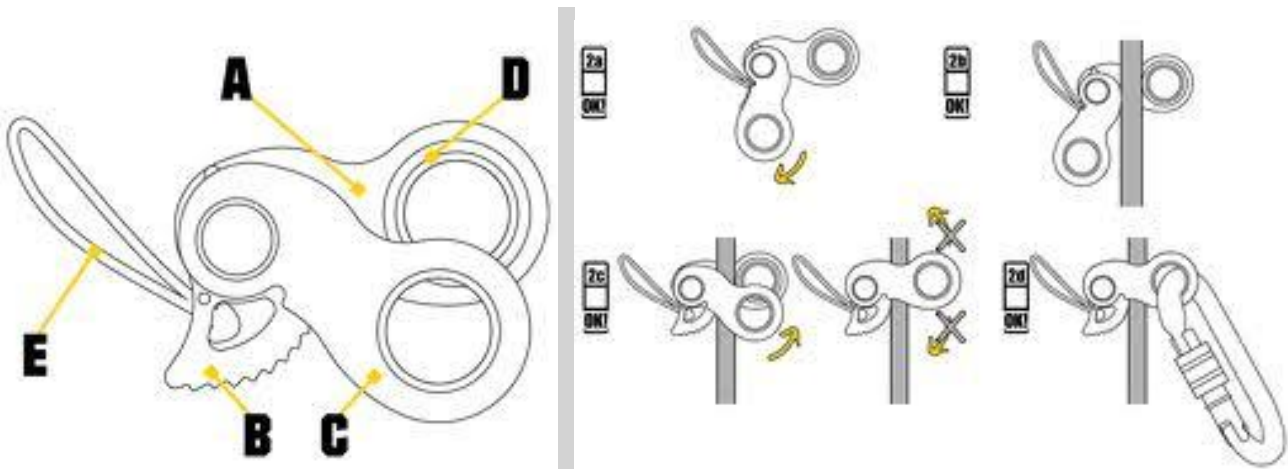

A: Körper B: Klemmzahn C: beweglicher Flansch D: Gleitbuchse E: Zusatzseil

Geben Sie die Klemme frei und öffnen Sie die bewegliche Klemmbacke durch Drehen im Uhrzeigersinn. Jetzt wird der Duck auf das Seil eingesetzt und die Anwendungsrichtung überprüft. Schließen Sie die bewegliche Klemmbacke und klemmen Sie diese auf die Gleitbuchse. Anschließend befestigen Sie das Therapiegerät mittels eines Sicherheitskarabiners oder eines Soft Schäkels in der Gleitbuchse. Zur Höhenverstellung wird der Klemmzahn durch Ziehen am Zusatzseil geöffnet und kann jetzt nach oben oder unten justiert werden.

Kontrolle vor und nach dem Gebrauch

Überzeugen Sie sich immer vom ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes. Achten Sie auf mechanische Verformungen, Risse oder Abnutzungserscheinungen. Die bewegliche Klemmbacke muss immer sicher auf der Gleitbuchse schließen, der Klemmzahn muss sich bei Freigabe immer automatisch und komplett wieder schließen.

Zusätzliche Informationen zum Handling des Produktes finden Sie in den, dem Duck beiliegenden Informationen des Herstellers.

Dieses Produkt darf nur von sachkundigen Personen verwendet werden. Der Duck ist für eine maximale Belastung von 400kg ausgelegt. Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.



Material:

- Hochfester Stahl
- Alu-Legierung (beweglicher Flansch)

Pflege:

Wenn notwendig, das Produkt häufig mit lauwarmen Trinkwasser reinigen, max. 40°C. Ggf. ein mildes Reinigungsmittel hinzufügen. Es anspülen, nicht schleudern und im Schatten und entfernt von direkten Wärmequellen trocknen lassen. Dieses Produkt immer an einem trockenen und sauberen Ort lagern, um Korrosion und Verschmutzung zu vermeiden, welche die Lebenszeit des Produktes verringern.

Zertifizierung:

Zertifiziert nach EN 567:97 und UIAA 126

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-Soft Schäkel

ULLEWAEH®-Sicherheitskarabiner

Halteseile Liros

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle des Materials stattzufinden! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Außerdem ist zu beachten, dass es keine Zugänglichkeit für Kinder geben darf – der Sicherheitskarabiner ist nur von unterwiesenen Personen zu bedienen, um der Klemmgefahr vorzubeugen.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarskonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel