

Produktanleitung

Stand: April 2014

Ullewaeh-Motorikrolle

Art.-Nr.: OW-1003



Beschreibung:

Die ULLEWAEH-Motorikrolle ist Spiel- und Therapiegerät zugleich. Sie kann am Boden zum Rollen, Balancieren, Durchkriechen und Entspannen genutzt werden. Mit zusätzlichem Netzbezug kann aus ihr eine taktile Waschtrommel werden. In Kombination mit den Ullewaeh®-Federsystemen sammeln Kinder kinästhetische Bewegungserfahrungen in alle Raumrichtungen.

Lieferumfang:

ULLEWAEH-Motorikrolle mit Netzverschluß und 4 integrierten Aufhängeschlaufen

Aufhängezubehör-Set:

- 2 x Federsystem
- 4 x 120cm Rundschlinge
- 4 x Sicherheitskarabiner

Aufbauanleitung:

Führen Sie die Deckenschlitten im Abstand von ca. 125cm an die gewünschten Positionen, so dass die Motorikrolle an den Ullewaeh-T-Schienen in einer 2-Punkt-Aufhängung befestigt werden kann. Achten Sie auf das „Klick“-Geräusch der Arretierungsbolzen.

Befestigen Sie an allen 4 Schlaufen der Motorikrolle jeweils eine 120cm lange Rundschlinge mit den Sicherheitskarabinern. Führen Sie die beiden vorderen und die beiden hinteren Schlaufen jeweils zusammen und hängen Sie diese in den Karabiner des Federsystems ein. Befestigen Sie die Federsysteme nun an der Ullewaeh-Deckenschiene, indem Sie die Sicherheitskarabiner der Federsysteme direkt an die Schäkel der

Spezial-Schlitten einhaken.

Hinweis: Durch die Verwendung zusätzlicher, kleiner Rundschlingen können Federsystem und Deckenschlitten entkoppelt und störende Geräusche vermieden werden.

Achten Sie immer auf die richtige Ausrichtung der Rolle, die mit der Bezeichnung „OBEN“ gekennzeichnet ist.

4. Fallschutz

Achten Sie auf adäquaten und ausreichenden Fallschutz. Ullewaeh bietet Ihnen für jede Fallschutzsituation einen passenden Fallschutz an. Wir informieren Sie gern.

**Die Ullewaeh-Motorikrolle ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

**Es ist sicherzustellen, dass sich während der Benutzung der Motorikrolle
keine Kinder darunter aufhalten! Auch im belasteten Zustand sollte immer
ausreichen Abstand zum Boden gewährleistet sein.**



Achtung

**Es ist weiterhin darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden Bewegungen
der Motorikrolle keine Kinder im Schwenkbereich aufhalten.**

Material:

Hochfestes Cordura

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn., welches besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Maße:

- Außendurchmesser: 125 x 70 cm
- Innendurchmesser: 60 cm
- Gewicht ca. 20kg

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-Aufhängezubehör-Set

ULLEWAEH®-Rundschlingen zur Entkopplung

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel

Ullewaeh GmbH • Am Flugplatz 4 / Haus 6 • 23560 Lübeck
Tel.: 0451 / 5040361 • Fax: 0451 / 5040371 • E-Mail: info@ullewaeh.de
HRB-Nr. 5591 • UStID-Nr. DE 227 866 514