

Produktanleitung

Rollenrutschbahn

Art.-Nr.: SP-1013-20 / SP-1013-25



Beschreibung:

Die Rollenrutschbahn ermöglicht zahlreiche Abrollvarianten (Bauch-, Rückenlage, Sitzen, Kniestand, Vorwärts, Rückwärts) eine taktil – kinästhetische sowie vestibuläre Stimulation.

In der Therapie sowie im Frühförderbereich dient sie der Aktivierung des Muskeltonus und der Verbesserung der Propriozeption.

Lieferumfang:

1x Rollenrutschbahn

Erhältlich in den Maßen:

200cm x 60cm

250cm x 60cm

300cm x 60cm

(Sonderbemaßungen sind möglich)

Nutzungshinweise:

Durch Aussparungen im stabilen Mehrschichtholzrahmen kann die Rollenrutschbahn mühelos in alle handelsüblichen Sprossenwände eingehängt werden.

In Verbindung mit dem ULLEWAEH®-Einhängepodest ist Sie ein optimale Ergänzung mit hohem Aufforderungscharakter.

Die äußerst resistenten, aus blauem Spezialschaumstoff gefertigten Rollen lassen sich bei Bedarf ganz einfach einzeln nachbestellen und austauschen.

**Das Rollenrutschbahn ist für eine maximale Belastung von 100 Kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

Material:

Stabiler Mehrschichtholzrahmen mit blauen, abwaschbaren Spezialschaumstoffrollen

Pflege:

Die Rollenrutschbahn kann mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Tuch abgewischt werden.

Die blauen Rollen müssen im Reinigungsfall mit besonderer Vorsicht abgewischt werden, um das Material nicht zu beschädigen!

Bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-Neigbare Sprossenwand,

ULLEWAEH®-Rollbrettbahn

ULLEWAEH®-Einhängepodest

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel