

**Produktanleitung**

Stand: April 2014

**Pferdeschaukel**

Art.-Nr.: 8400/OW-1007



Abb. ähnlich, Farbe der Aufhängeseile: schwarz

**Beschreibung:**

Die Pferdeschaukel bietet hohe Qualität und maximale Stoßsicherheit für entspannte SI-Therapien in der Ergotherapie oder Psychomotorik. Methodisch genau abgestimmte Schaukelsituationen an 4-Punkt-, 2-Punkt- und 1-Punkt-Aufhängung sind möglich, wodurch unterschiedliche Schwingungsrichtungen und Amplituden erzeugt werden. Durch die Verlängerungsseile mit Stellacht ist eine stufenlose, auf den Nutzer und die Behandlungssituation abgestimmte Höhenverstellung möglich. Differenzierte vestibuläre Stimulation sowie kinästhetische Bewegungserfahrungen in 3 Raumrichtungen (mit ULLEWAEH - Federsystemen) sind erfahrbar.

Die Pferdeschaukel besteht aus einer allseitig gepolsterten Platte mit halbzyklindrischem Schaumstoff-Aufsatz. Der Cordura-Bezug ist abnehmbar.

**Maße:**

Halbzylinder, Durchmesser 30cm  
Länge: 1,25m

**Lieferumfang:**

- 1 Pferdeschaukel aus Cordura, Farbe: grün, inklusive
- 4 x 2m Aufhängeseile mit Stellacht und Öse
- 4 Stück Sicherheitskarabiner
- 4 Stück Schutzschläuche



**Pferdeschaukeln sind für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt.  
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

**Es ist darauf zu achten, dass sich bei schwingenden oder pendelnden  
Bewegungen der Pferdeschaukel keine Kinder im Pendelbereich  
aufhalten.**



**Material:**

Hochfestes Cordura

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn., welches besonders resistent gegenüber Rissen, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

**Pflege:**

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

**Empfohlenes Zubehör:**

ULLEWAEH®-Soft-Silence Schlitten  
ULLEWAEH®-T-System

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

**Sicherheitshinweis:**

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponente



# Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT  
Optimale Nutzung von  
ULLEWAEH-Produkten

## Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr  
**Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung  
von ULLEWAEH-Produkten

# ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details  
finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel