

Produktanleitung

Stand: Januar 2014

Ullewaeh-Schwebekorb mit SI-Schaukel

Art.-Nr.: 8400/2107 137



Abbildung mit alternativer Aufhängevariante

Beschreibung:

Das Multitalent: Schwebekorb – Heißluftballon – Schaukelhöhle

Mit dem Schwebekorb lassen sich unterschiedlichste Situationen darstellen. Aufgehängt an 4 Punkten, lädt er dazu ein, im Korb eines Heißluftballons davon zu fliegen. Wird das Dach geschlossen, so entsteht eine Schaukelhöhle, in welcher man sich entspannen und zusammenkuscheln kann. Aussichtsfenster stellen den Kontakt zur Außenwelt her.

Neben der 4-Punkt-Aufhängung können auch Mobilé oder Federsysteme eingesetzt werden, wodurch unterschiedlichste Schaukelsituationen adaptiert werden können. Somit findet der Korb besonders auch in der klassischen SI-Therapie seine Anwendung.

Beschreibung Schwebekorb-Bezug:

- Maße 80cm x 80cm x 85cm (Höhe) mit 4 Aufhängepunkten aus stabil vernähtem Gurtband
- 3-seitig umlaufender Reißverschluss zum Öffnen des Oberteils
- Reißverschluss in U-Form mit 2-fachem Schieber auf der Frontseite zum Öffnen inklusive 2 Klettaschen zum Fixieren des Materials nach dem Aufrollen
- Zusätzliches Fenster mit Netz (ca. 33cm x 40cm) in der Tür mit verschließbarem Überschlag
- Farbe: Marine
- Material: Cordula

Schaukelsituationen



Bild 1: Schaukelhöhle



Bild 2: Mobilé



Bild 3: Kuschelnest

Lieferumfang:

- 1 Schwebekorb-Bezug
- 1 Standard SI-Schaukel mit
- 4 Aufhängeseilen à 2m Länge Ø16mm weichgeschlagenes Hempex Tauwerk mit Stellacht
- 4 Schutzschläuche
- 4 Sicherheitskarabinern mit Schraubsicherung belastbar bis 22KN

Ist eine SI-Schaukel bereits vorhanden, so kann der Schwebekorb-Bezug auch einzeln als Ergänzung dazu kombiniert werden.

Aufbauanleitung:

1. Positionierung der Deckenschlitten

Arretieren Sie die Spezialdeckenschlitten je nach Aufhängesituation (4-Punkt-, 2-Punkt oder 1-Punkt-Situation) auf den Deckenschienen in adäquater Position. Wählen Sie eine möglichst zentrale Position im Raum aus, um einen optimalen Schwingungsraum zu gewährleisten. Achten Sie auf die sichere Arretierung des Schlittens / „Klick“-Geräusch muss zu hören sein.

2. Aufbau Schwebekorb

Legen Sie die SI-Schaukel in den Schwebekorb ein. Ziehen Sie nun die Aufhängeseile durch die oberen Aufhängepunkte des Schwebekorb-Bezugs und stellen Sie das Seil mit Hilfe der Stellacht auf die gleiche Länge ein, so dass eine parallele bzw. lotrechte Aufhängung erreicht und ein gleichförmig schwebendes Schaukeln ermöglicht. Nehmen Sie hierfür das Ende des Seils, an dem die Stellacht befestigt ist und ziehen Sie diese durch die Aufhängepunkte des Schwebekorbs. Schlagen Sie das durchgeführte Seilende parallel zurück zum Seil und bestimmen Sie die benötigte Aufhängehöhe. Bilden Sie mit dem Seil eine Öse an der gewünschten Aufhängeposition, d.h. auf der Höhe, in der sich die Stellacht nun befindet. Öffnen Sie den Stahlbügel der Stellacht und schieben Sie die mit dem Seil gebildete Öse soweit hindurch, bis der Stahlbügel wieder runtergeklappt werden kann. Ziehen Sie das Seil anschließend an beiden Enden, sodass es in der Stellacht einrastet.



Abbildung ähnlich

Verbinden Sie nun die Ringe der Verlängerungsseile mit den Sicherheitskarabinern und anschließend die Sicherheitskarabiner mit den Spezialschlitten, indem Sie den Sicherheitskarabiner in den Spezialdeckenschlitten einhängen. Auf korrekte, d.h. handfeste Verschraubung des Sicherheitskarabiners ist zu achten. Als letztes werden die Schutzschläuche über der Stellacht positioniert und mit den Klettverschlüssen fixiert.

4. Fallschutz

Achten Sie auf adäquaten und ausreichenden Fallschutz durch entsprechende Turnmatten. Ullewaeh bietet Ihnen für jede Fallschutzsituation einen passenden Fallschutz an. Wir informieren Sie gerne!

**Der Ullewaeh-Schwebekorb ist für eine maximale Belastung von 150 kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

Es ist sicherzustellen, dass sich während der Benutzung des Schwebekorbs keine Person darunter aufhält! Auch im belasteten Zustand sollte immer ein ausreichender Abstand zum Boden gewährleistet sein.



Material:

Hochfestes Cordura (Marine)

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn verträgt extrem starken Abrieb. Es ist ein spezielles Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Risse, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T

ULLEWAEH®-Entkopplungsschlitten

ULLEWAEH®-Mobilé

ULLEWAEH®-Systemzubehör

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel