



1. Stellacht      2. Ring      3. Sicherheitskarabiner

**Beschreibung:**

Das ULLEWAEH-Aufhängeseil ist eine praktische Lösung, um verschiedene Therapiegeräte und Schaukeln aufzuhängen oder in der Höhe zu verlängern bzw. zu verstellen. Durch die einseitig angebrachte Stellacht ergeben sich zentimetergenaue Aufhängepositionen, welche jederzeit nur mit wenigen Handbewegungen eingestellt werden können.

**Lieferumfang:**

Ullewaeh-Aufhängeseil aus weichgeschlagenem Hempex Tauwerk 16 mm ausgestattet mit Ring und Stellacht. Das Seil ist in den Standardlängen 1,00 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m und 4,00 m lieferbar. Weitere Längen können auf Anfrage gefertigt werden.

**Aufhängeanleitung:**

**1. Einstellen der Stellacht**

Nehmen Sie das Ende des Seils, an dem die Stellacht befestigt ist und bilden Sie eine Öse. Stellen Sie die Öse auf die gewünschte Aufhängeposition ein. Öffnen Sie nun den Stahlbügel der Stellacht und schieben Sie das Seil soweit hindurch, bis der Stahlbügel wieder runtergeklappt werden kann. Ziehen Sie das Seil anschließend an beiden Enden, sodass es in der Stellacht einrastet.

## 2. Verbindung mit dem Therapiegerät

Wiederholen Sie den Vorgang 1. indem Sie die Öse um die Aufhängeschleufe des jeweiligen Therapie- bzw. Spielgerätes legen. Achten Sie darauf, dass bei 2- oder 4-Punktaufhängungen die Seile auf die gleiche Länge eingestellt werden.



## 3. Befestigung mit dem Schienensystem T oder X

Verbinden Sie den Ring des Verlängerungsseiles mit einem Sicherheitskarabiner, welcher mit einer Verschraubung gesichert wird. Verbinden Sie nun den Sicherheitskarabiner mit dem Decken- oder Wandschlitten (Entkopplung über Rundschlinge siehe ULLEWAEH®-Systemzubehör). Führen Sie diesen Vorgang für alle Aufhängungspunkte durch.



## HINWEIS: Sicherung der Stellacht

Um Kinder vor den Fingerfangstellen der Stellacht zu schützen, empfehlen wir Seilschutztaschen von Ullewaeh! Positionieren Sie die Seilschutztaschen in Höhe der Stellacht und fixieren Sie diese mit Hilfe der angebrachten Klett-Flausch-Verbindung. Achten Sie darauf, dass die Seilschutztaschen fest verschlossen sind.



**Das Ullewaeh-Aufhängeseil hat eine Seilbruchkraft von 2180 daN im Spleiß.  
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

**Material:**

PP-hempex Tauwerk, Konstr.3-schäftig, 16 Durchmesser

Werkstoff: Polypropylen-Multifil Farbe Natur

Seilbruchkraft: 16mm 2180 daN im Spleiß

Pressung: Alu-Pressklemme S 16 Sdlg 25mm

Ring mit Kausche

Stellacht mit Kausche

Zugbelastung 1885 daN

Seilverbinder: Seilknoten ohne Kugelnknoten verspleißt

**Pflege:**

Grobe Verschmutzungen können mit einem leicht feuchten Tuch entfernt werden. Zum Trocknen hängen Sie das Aufhängeseil an einem gut gelüfteten Ort auf. Waschen Sie das Aufhängeseil nicht in der Waschmaschine! Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da hierbei Schmutz, Staubkörnchen oder andere feine Gegenstände noch tiefer in die Seile eindringen und die Fasern beschädigen können.

**Empfohlenes Zubehör:**

ULLEWAEH®-System T,

ULLEWAEH®-Systemzubehör

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

**Sicherheitshinweis:**

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.

**ULLEWAEH!**  
Therapie- & Kindergartenbedarf



## Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT  
Optimale Nutzung von  
ULLEWAEH-Produkten

## Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr  
**Oliver Wagner**



**SICHER BEWEGEN**  
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung  
von ULLEWAEH-Produkten

**ULLEWAEH!**

BEWEGTES ZENTRUM

## Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details  
finden Sie auf: [www.ullewaeh.de](http://www.ullewaeh.de)

ULLEWAEH GmbH  
Am Flugplatz 4/Haus 6  
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361  
Fax 0451 - 50 40 371  
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**  
Sonnhofener Straße 37 · 24146 Kiel