

Produktanleitung
Stand: Dezember 2013

Drehwirbel
Art.-Nr.: UZ-1200.



Beschreibung:

... und alles dreht sich.

Der Drehwirbel ermöglicht eine zusätzliche Dimension der Bewegung: neben den achsialen Schaukelbewegungen können Schaukeln an einem Punkt zusammengeführt werden und in die rotierende, kreisende Bewegung gebracht werden. Der kugelgelagerte Drehwirbel wird mittels des oberen Schäkels in den Deckenschlitten oder die Einpunktaufhängung gehangen, das Therapiegerät anschließend mit Sicherheitskarabiner oder Soft-Verbinder in die unten angebrachte Öse eingehangen. Dank der Kugellagerung ist die Drehbewegung absolut leichtgängig und vollkommen leise.

Lieferumfang:

- 1 Drehwirbel

Bedienung:

Schließen Sie den Drehwirbel mittels Schäkel an den Deckenschlitten oder die Einpunktaufhängung an. Lösen Sie hierfür die Splintsicherung und ziehen Sie den Splint heraus. Jetzt können Schlitten und Drehwirbel zusammengebaut werden. Achten Sie beim Schließen des Schäkels darauf, dass die Sicherung des Splints (Feder) ordnungsgemäß wieder eingebracht ist.

Das Anbringen des Drehwirbels darf nur von geschulten Erwachsenen erfolgen.

Material:

- Edelstahl, poliert und gebürstet
- Materialdurchmesser Schäkel: 5 mm
- Materialdurchmesser Splint: 5 mm
- Gehäuse: Länge 40mm, Durchmesser 35mm
- Gesamtlänge inkl. Rundstahl-Schäkel: 110mm
- Gewicht: 160g

- Arbeitslast ca. 500kg, Bruchlast ca. 1000kg

Pflege und Lagerung:

Verschmutzungen lassen sich mit einem feuchten Tuch einfach abwischen.

Lagern Sie den Drehwirbel stets trocken und in einer sauberen Umgebung. Schmutz und Feuchtigkeit beeinträchtigen die Lebensdauer der Produkte zum Teil erheblich.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T,

ULLEWAEH®-Systemzubehör

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle des Materials stattzufinden! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Außerdem ist zu beachten, dass es keine Zugänglichkeit für Kinder geben darf – der Sicherheitskarabiner ist nur von unterwiesenen Personen zu bedienen, um der Klemmgefahr vorzubeugen.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel