

Produktanleitung

Stand: Dezember 2013

Softflexsysteme

Art.-Nr.: 8401/212026 /208026 /210026



5kg / 7,5kg / 10kg / 12,5kg

Beschreibung:

Softflexsysteme wirken wie ein Stoßdämpfer und machen die Bewegungen weich. Die innenliegenden Gummiseile sind mit einem Gewebeschlauch ummantelt, welcher beidseitig zur Schlaufe umgelegt und verpresst ist. Die unterschiedlichen Farben markieren die Gewichtsklasse:

Schwarz*:	12,5 kg (Gummiseil Ø 14mm)	Zugkraft max. 125kg
Blau:	10,0 kg (Gummiseil Ø 12mm)	Zugkraft max. 100kg
Gelb:	7,5 kg (Gummiseil Ø 10mm)	Zugkraft max. 75kg
Grün:	5,0 kg (Gummiseil Ø 8mm)	Zugkraft max. 50kg

Entsprechend des gewünschten Dämpfungsgrades werden die Softflexsysteme individuell zusammengestellt und zwischen dem Aufhängesystem und dem Therapiegerät positioniert.

Lieferumfang Einzelsystem:

- 1 St. Softflexsystem 5kg / 7,5kg / 10kg

Lieferumfang Set:

- 2er Set: 2St. Softflexsystem 12,5kg (schwarz)
- 3er Set: 3St. Softflexsystem 12,5kg (schwarz)
- 4er Set: 4St. Softflexsystem 12,5kg (schwarz)

*nicht abgebildet

Nutzungshinweise:

Länge inkl. Schlaufen: ca. 33cm

Vor und nach dem Gebrauch sollten alle Produkte auf Gebrauchsspuren, Abrieb, Veränderungen in der Struktur etc. überprüft werden und ggf. ausgetauscht werden. Scharfe Kanten, Nässe und Verunreinigungen können die Festigkeit und Lebenszeit der textilen Produkte verringern.



Material:


Qualitäts-Gummiseil mit hoher Dehnung (mit hochfestem Polyestergerüst umflochtene Naturlatexfäden)

Schutzschlauch aus Polypropylen-Gewebe als zusätzlicher Schutz und Dehnungsbegrenzung


Die verwendeten Materialien entsprechen dem Öko-Text Standard.

Pflege:

Reinigen:

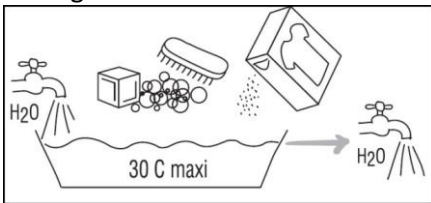

Trocknen:

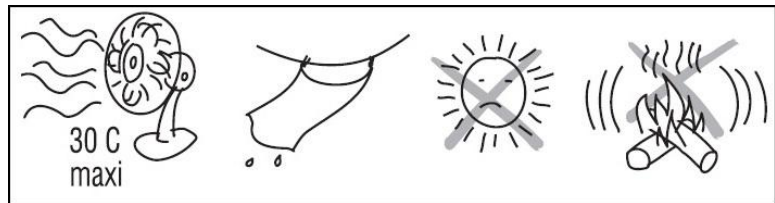

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T,
ULLEWAEH®-Systemzubehör
Sicherheitskarabiner

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien zu erfolgen! Um die Lebensdauer dieses Produktes zu erhöhen, ist es nötig, bei seinem Transport und seiner Verwendung Sorgfalt walten zu lassen. Vermeiden Sie Stöße, Reibung auf rauen Materialien oder auf scharfen Teilen.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel