

Produktanleitung
Stand: Dezember 2013

Sicherheitskarabiner
Art.-Nr.: UZ-1007



Beschreibung:

Der Sicherheitskarabiner ist zum Aufhängen und Befestigen zahlreicher temporärer Therapiegeräte an das Ullewaeh-Schienensystem geeignet. Der Schnäpper dieses Verschlusskarabiners ist durch eine verschraubbare Hülse gegen versehentliches Öffnen geschützt (EN 362).

Lieferumfang:

- 1 Sicherheitskarabiner mit Schraubsicherung belastbar bis 22 kN

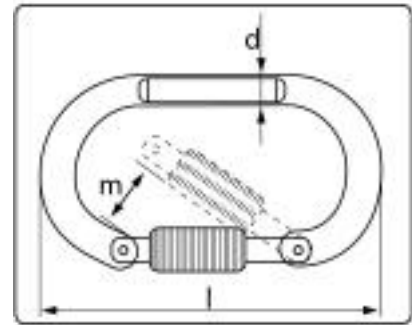
Bedienung:

Lösen Sie die Sicherheitsverschraubung durch Drehen an dem Gewinde. Dann lässt sich der Karabiner öffnen und in das gewünschte Zubehör einhängen. Beachten Sie, nach dem Schließen des Karabiners auch die Sicherheitsverschraubung wieder zuzudrehen und zwar nur bis zum Ende des Gewindes, damit sie sich auch gut wieder öffnen lässt.

**Der Sicherheitskarabiner ist für eine maximale Belastung von ca. 220kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

Material:

- Hochfester Stahl mit verzinkter Oberfläche
- Materialdurchmesser: „d“ 10 mm
- Öffnungswinkel: „m“ 18 mm
- Gesamtlänge: „l“ 104 mm
- Gewicht: 146g
- Festigkeit: statische Belastung 2.500 daN

**Pflege:**

Verschmutzungen lassen sich einfach abwischen.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T,

ULLEWAEH®-Systemzubehör

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle des Materials stattzufinden! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Außerdem ist zu beachten, dass es keine Zugänglichkeit für Kinder geben darf – der Sicherheitskarabiner ist nur von unterwiesenen Personen zu bedienen, um der Klemmgefahr vorzubeugen.

ULLEWAEH!

Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarekonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel