

Produktanleitung

Stand: Januar 2015

Ullewaeh Therapietisch

Art.-Nr.: 080-2210



Beschreibung:

Der ULLEWAEH®-Therapietisch ist die perfekte Ausstattung für Räume, die sich regelmäßig an die Bedürfnisse von seinen Benutzern anpassen müssen. Per Knopfdruck lässt er sich auf die Sitzhöhe von Krippenkindern, bis hin zur benötigten Sitzhöhe von Erwachsenen stufenlos einstellen. Seine komplett freitragende Konstruktion ist besonders geeignet für Rollstuhlfahrer und Menschen mit Beeinträchtigungen. Wird er nicht als Tisch benötigt, so kann er mühelos aufrecht gestellt werden und mit seiner multifunktionalen Rückseite als zusätzliches Tafel-Therapiemedium (White Board) genutzt werden.

Besonderheiten des Therapietisches:

- Tischplatte Breite 80cm Tiefe 140cm
- Tischhöhe von 40cm bis 80cm stufenlos einstellbar
- komplett frei tragende, barrierefreie Konstruktion
- Rückseite mit Tafel-Zusatzfunktion (White-board Maker)
- Kein Elektroanschluss notwendig

Lieferumfang:

ULLEWAEH Therapietisch bestehend aus:

- 1 Tischplatte 80x140x6cm, Oberseite HPL Birke, Unterseite HPL Magnettafel und White Maker Board
- 1 Korpus-Verkleidung Birke Multiplex, geölt
- 1 Rückwand Birke Multiplex, geölt

1 Grundträger mit

- 1 starr blockierbare Gasdruckfeder zur stufenlosen Höheneinstellung, Hub 400mm
- 1 hydraulische Auslösung mit Edelstahl-Druckknopf Set
- 2 Gasdruckfedern zur Unterstützung der Klappfunktion
- 2 Stahl-Wangen mit Kunststoff-Gelenkaufnahme der Tischplatte, weiß lackiert
- 1 Stahl Aussteifungs- und Lagerrahmen der Tischplatte
- 2 x 1,5m Linearrollenführung als Los- und Festlager
- 4 x Rollenläufer mit jeweils 3 Lastrollen

Montagehinweise:

Der Therapietisch wird als komplettes Bauteil geliefert und mit seiner Rückwand an die bauseits frei gehaltene Wand montiert. Ein Elektroanschluss ist nicht notwendig.

Die Befestigung darf nur von Fachfirmen durchgeführt werden, die den Zustand der vorhandenen Wand beurteilt und die entsprechenden Anker zur Anbindung an die vorhandene Wand auswählt.

Die Ullewaeh GmbH übernimmt keine Gewährleistung bei nicht fachgerechter Ausführung und Montage!

Nutzungshinweise:

Die Tischplatte wird über zwei Gasdruckfedern in der aufrechten Position gehalten und gesichert. Zum Herunterklappen der Tischplatte muss dieser Widerstand durch Ziehen im oberen Bereich überwunden werden. Die Tischplatte kann nun bis zum unteren waagerechten Anschlag herunter geführt werden. Bitte die Tischplatte nichtfallen lassen!

Um die Höhe der Tischplatte einzustellen, wird der Edelstahl-Druckknopf am Korpus gedrückt. Die dahinterliegende Hydraulik gibt die Gasdruckfeder frei, wodurch nun mittels leichten Drucks nach oben oder unten die Tischplatte in Ihrer Höhe eingestellt werden kann. Mit dem Loslassen des Druckknopfs blockiert die Gasdruckfeder und der Tisch sitzt fest in seiner Höhe verankert.



Eingliederung des Therapietisches in den Raum.

Wird der Tisch nicht mehr benötigt, kann er in jeder beliebigen Höhenposition wieder nach oben geklappt werden. Der Druck der Gasdruckfedern sichert den Tisch in hochgeklappter Lage. Auch in dieser Position kann der Tisch durch Drücken des Auslöseknopfes in seiner Höhe auf- und abgefahren werden, um die Höhe des Tafel auf seine Benutzer einzustellen.

Die Einstellung des Tisches muss durch einen geschulten Erwachsenen erfolgen.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Bauteile, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

ULLEWAEH!
Therapie- & Kindergartenbedarf



Sicher bewegen!

SEMINARANGEBOT
Optimale Nutzung von
ULLEWAEH-Produkten

Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr
Oliver Wagner



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung
von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details
finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel