

Produktanleitung

Stand: April 2014

Ullewaeh-Schwebetuch

Art.-Nr.: OW-1001



Beschreibung:

Das Ullewaeh-Schwebetuch ist das multifunktionale Basis-Therapiemodul zur Wahrnehmungsverbesserung. Es fördert und verbessert die gesamte vestibuläre Wahrnehmung. An zwei Punkten im Raum aufgespannt, entsteht ein Schlauch bzw. die „Gletscherspalte“. Sie dient zur Verbesserung der propriozeptiven Wahrnehmung.

Lieferumfang:

Ullewaeh-Schwebetuch aus Cordura 285 x 285 cm (Außen-Ø) inklusive:

- 4 Integrierten Polyacrylgurte (jeweils 250cm lang) mit Laschen,
- 4 Ullewaeh-Spezialfedersystemen (bestehend aus 4 Federn, Zugbegrenzungsseil, 8 Sicherheitskarabiner und 4 Federschutztaschen aus Cordura)
- 1 Transporttrucksack

Aufbauanleitung:

1. Horizontale Aufhängung des Schwebetuches

Arretieren Sie die Wandschlitten auf den vier vertikalen Schienen in gleich hoher Position (abhängig von der Anzahl der Kinder, die das Tuch benutzen).

Grundsätzlich gilt: Je höher die Gewichtsbelastung, desto größer der Durchhang des Schwebetuches. Somit müssen die Wandschlitten individuell auf die Motorik-/ bzw. Therapiesituation angepasst werden.

Achten Sie auf die sichere Arretierung des Schlittens / „Klick“-Geräusch muss zu hören sein.

2. Ausrichtung im Raum

Breiten Sie das Tuch zentral aus und richten Sie es so aus, dass eine Verbindung zu den vier Wandschlitten möglich ist.

3. Befestigung des Schwebetuches

Wählen Sie die angemessene Schlaufe an der Schlaufenbandverlängerung aus. Hängen Sie dann das Federsystem in die ausgewählte Schlaufe ein. Dieses erfolgt über einen Sicherheitskarabiner, welcher mit einer Verschraubung gesichert wird. Verbinden Sie nun den zweiten Sicherheitskarabiner des Federsystems mit dem Wandschlitten (Entkopplung über Rundschlinge siehe ULLEWAEH®-Systemzubehör). Führen Sie diesen Vorgang für alle vier Aufhängungspunkte durch.

Hinweis: Erfahrungsgemäß lässt sich der 4te Punkt am schwersten einhängen. Besonders wenn das Schwebetuch nur von einer Person aufgehangen wird, empfiehlt es sich, das Ullewaeh- Flaschenzugsystem zur Unterstützung dazu zu nehmen.

4. Fallschutz

Achten Sie auf adäquaten und ausreichenden Fallschutz durch entsprechende Turnmatten. Ullewaeh bietet Ihnen für jede Fallschutzsituation einen passenden Fallschutz an. Wir informieren Sie gerne!

**Das Ullewaeh-Schwebetuch ist für eine maximale Belastung von 150 Kg ausgelegt.
Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.**

Es ist sicherzustellen, dass sich während der Benutzung des Schwebetuches keine Person darunter aufhält! Auch im belasteten Zustand sollte immer ein Abstand von 45-50cm zum Boden gewährleistet sein.



Material:

Hochfestes Cordura (blau)

Cordura® sind extrem strapazierfähige Polyamid 6.6- (Nylon-) Gewebe aus einem lufttexturiertem Spezialgarn verträgt extrem starken Abrieb. Es ist ein spezielles Fabrikat, welches besonders resistent gegenüber Risse, Abreibung und Abnutzung ist. Cordura überzeugt durch seine Beständigkeit und Haltbarkeit.

Pflege:

Kleinere Verschmutzungen lassen sich mit einem leicht feuchten Tuch einfach vom Gewebe abwischen. Auf den Einsatz von Weichspüler ist unbedingt zu verzichten, da er die funktionelle Ausrüstung des Materials zerstört.

Empfohlenes Zubehör:

ULLEWAEH®-System T,
ULLEWAEH®-Systemzubehör

Eventuell benötigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von Ihrem Lieferanten oder der Ullewaeh GmbH Lübeck.

Sicherheitshinweis:

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! Sollten funktionsrelevante Abnutzungserscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.
Verwenden Sie bei Austausch/Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten.



Nutzen Sie das volle Potential



Mit dem Erwerb von ULLEWAEH!-Produkten haben Sie perfekte und vielseitige Möglichkeiten für Bewegung geschaffen.

Damit Sie dieses neue Bewegungspotential bestmöglich nutzen können, haben wir gemeinsam mit Motopädagogen (Bewegtes Zentrum) ein umfassendes Seminarkonzept entwickelt. Individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, soll allen Teilnehmern ein sicheres Handling mit unseren Systemen und Produkten vermittelt werden, sowie Freude an der Bewegung.

Neben einer optimalen Nutzung aller ULLEWAEH!-Produkte durch alle Beteiligten, stellt das Seminar einen ersten wichtigen Schritt zum bewegungsorientierten Kindergarten dar.

Für detaillierte Informationen sprechen Sie uns gerne an (Telefon 0451-5040361)

Ihr **Oliver Wagner**



SICHER BEWEGEN
SEMINARANGEBOT: Optimale Nutzung von ULLEWAEH-Produkten

ULLEWAEH!

BEWEGTES ZENTRUM

Experten schulen

„BEWEGTES ZENTRUM“ ist ein Zusammenschluss aus staatlich anerkannten Bewegungsspezialisten (Motopädagogen) mit pädagogischer Grundausbildung und vielfältiger Berufserfahrung.

Die Grundlage ihrer Arbeit ist die Psychomotorik. Diese setzt an den Stärken der Teilnehmer an. Grundlegende Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen werden spielerisch und mit Freude vermittelt und dadurch Eigenaktivität und Handlungskompetenz gefördert. Dabei wird ein ganzheitlicher Ansatz (geistiger, emotionaler und körperlicher) verfolgt, welcher Wissen und Handling durch Wahrnehmen und Bewegen nachhaltig verankert.

Weitere Informationen und Details finden Sie auf: www.ullewaeh.de

ULLEWAEH GmbH
Am Flugplatz 4/Haus 6
23560 Lübeck

Tel. 0451 - 50 40 361
Fax 0451 - 50 40 371
info@ullewaeh.de

Unser Kooperationspartner

 **Bewegtes Zentrum**
Sonthofener Straße 37 · 24146 Kiel